

MEGA PONTES



Soluções em Tecnologia Acessível

Manual do Utilizador

Snow Pad



Marca: Zoomax ISO: 220318

Março 2025

Obrigado por comprar na MegaPontes.

Por favor, guarde estas instruções para consulta futura.

Conteúdo

- **Introdução e Utilização**
- **Segurança e cuidados**
- **Conheça o Snow Pad**
 - **O que vem na embalagem**
 - **Visão geral do Snow Pad**
 - **Desdobrar o Snow Pad**
 - **A câmara de zoom ótico**
 - **Carregue a bateria**
- **Use com um tablet**
 - **Tablets recomendados**
 - **Posicionar/Remover Tablet**
 - **Ligue o dispositivo ao tablet**
 - **Ligar/Desligar**
- **Baixe a aplicação SnowPad**
 - **Página inicial 1**
 - **Intervalo de ampliação**
 - **Aumentar ou diminuir o zoom**
 - **Movimento panorâmico**
 - **Correção de imagem espelhada**

- **Bateria da câmara do Snow Pad**
- **Obter imagem**
- **Congelar**
- **Recentes**
- **OCR/conversão de texto em fala**
- **Modo de cor**
- **Ajuste do valor de contraste**
- **Localizar**
- **Mudança de modo de câmara**
- **Saiba mais**
- **Página inicial 2**
 - **Visualização de detalhes**
 - **Selfie**
 - **Linha de leitura**
 - **Pasta de Ficheiros**
 - **Configurações**
 - **Bloqueio de foco**
 - **Voltar**
- **Revisão de imagem e OCR/Texto-para-fala**
 - **Imagem/Texto**
 - **Ler**
 - **Velocidade**
 - **Reconhecimento de texto**
 - **Mudança de Direção**
 - **Editar**
 - **Modo de cor**

- **Edição de imagem**
 - **Saída**
 - **Gravar**
 - **Anular**
 - **Mudança de Direção**
 - **Pincel**
 - **Modo de cor**
 - **Corte**
 - **Desfocado**
- **Pasta de arquivo**
- **Configurações**
- **Atualização de Software**
- **Especificações**
- **Resolução de problemas**
- **Como contactar a MegaPontes**
- **Termos e condições de venda**
- **Porquê reciclar?**
- **O que é o WEEE?**

1. Introdução e Utilização

Muito obrigado por escolher o Snow Pad, um amplificador de mesa portátil tudo-em-um.

Disponibiliza imagens de alta qualidade, uma experiência mais confortável, maior área de leitura

e escrita, uma lente com zoom ótico HD 7x, suporte estável e facilidade de utilização.

Por favor, leia este manual cuidadosamente, irá ajudá-lo a entender melhor os recursos do Snow Pad.

2. Segurança e cuidados

Para manter o Snow Pad em boas condições:

- Para evitar o risco de incêndio, não exponha o Snow Pad ao calor excessivo ou à luz solar direta.**
- Use o Snow Pad em ambientes onde a temperatura esteja entre 10°C e 40°C.**
- Para evitar o risco de danos elétricos, mantenha o Snow Pad longe de líquidos e produtos químicos.**
- Para evitar o risco de choque elétrico, não tente desmontar a unidade. Por favor, encaminhe as solicitações de serviço para a MegaPontes.**
- Desligue sempre o Snow Pad antes de limpar. Use um pano de limpeza ou um pano macio e húmido para limpar o exterior.**

- **Por favor, não carregue o dispositivo com adaptadores e cabos diferentes dos disponibilizados com o Snow Pad. E também não use o adaptador e o cabo do dispositivo para carregar outros dispositivos eletrônicos.**


3. Conheça o Snow Pad

3.1 O que vem na embalagem

Encontra os seguintes itens dentro da embalagem do Snow Pad:


- **1 Dispositivo Snow Pad**
- **1 Mochila**
- **1 Adaptador de alimentação**
- **1 Cabo de carregamento**
- **1 Cabo USB Tipo-C**
- **1 Cabo FireWire**
- **1 Folha magnética**
- **1 Pano de limpeza**
- **1 Manual do utilizador**
- **1 Base de escrita e leitura**

3.2 Visão geral do Snow Pad

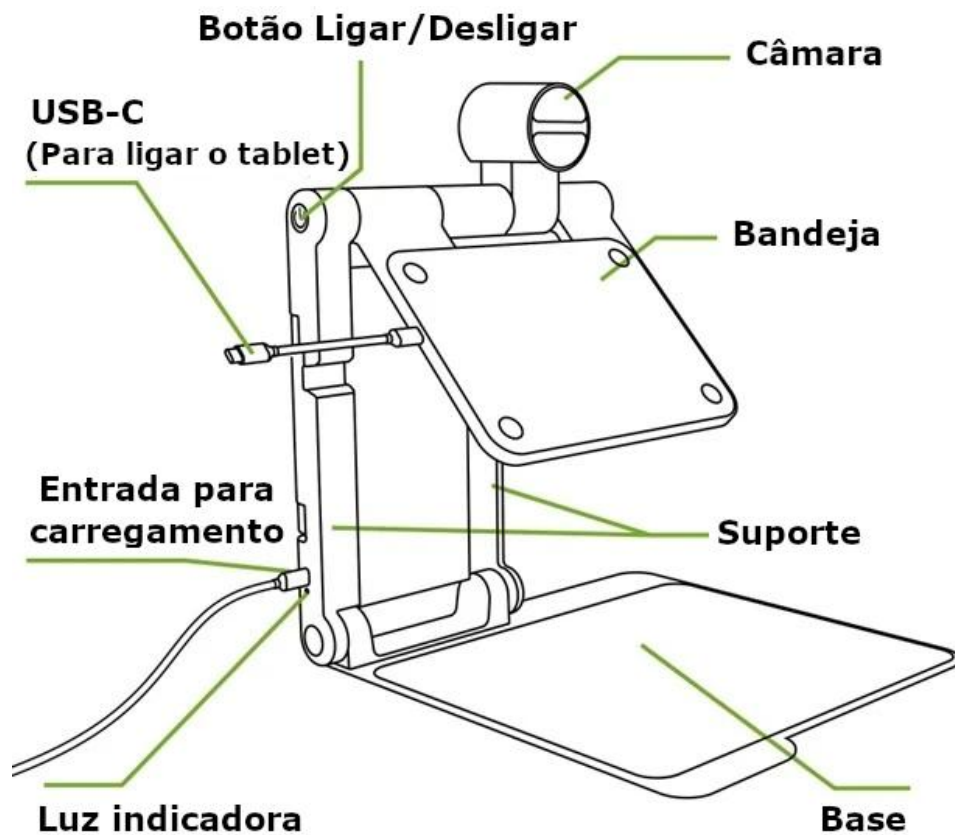


3.3 Desdobrar o Snow Pad

Segure a base com uma mão e levante a barra transversal (não a câmara) para cima com a outra mão para desdobrar o dispositivo.

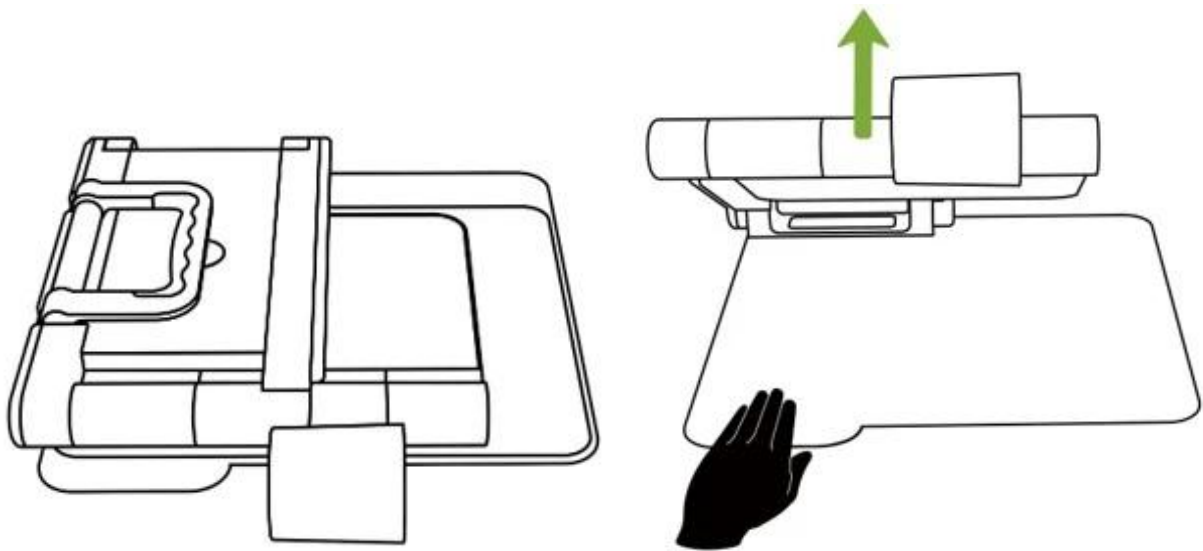


3.4 A câmara de zoom ótico

Rode 270 graus no sentido horário e 60 graus no sentido anti-horário.

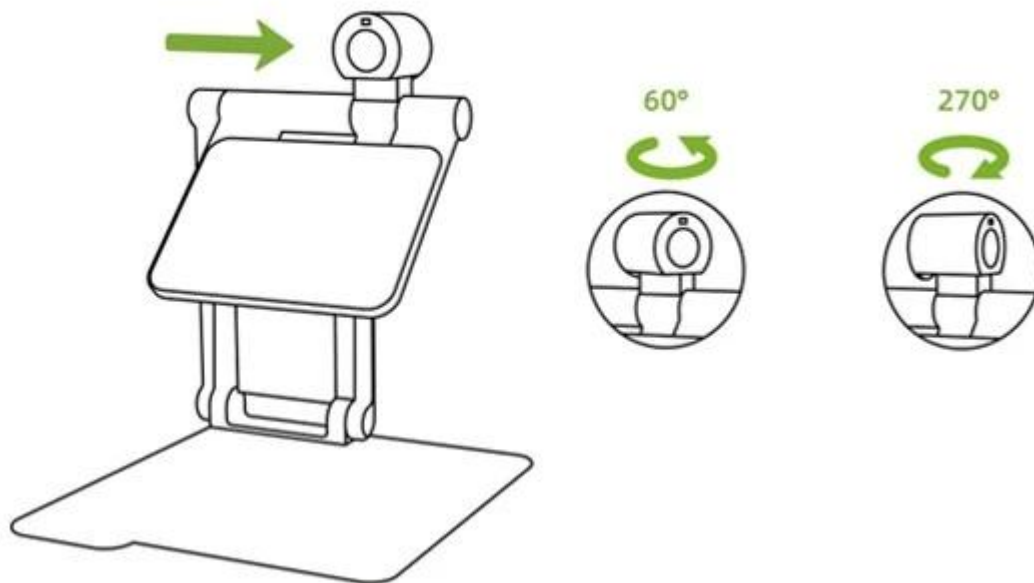


Vire 15 graus para cima e 40 graus para baixo (quando a câmara está na posição de visão à distância).

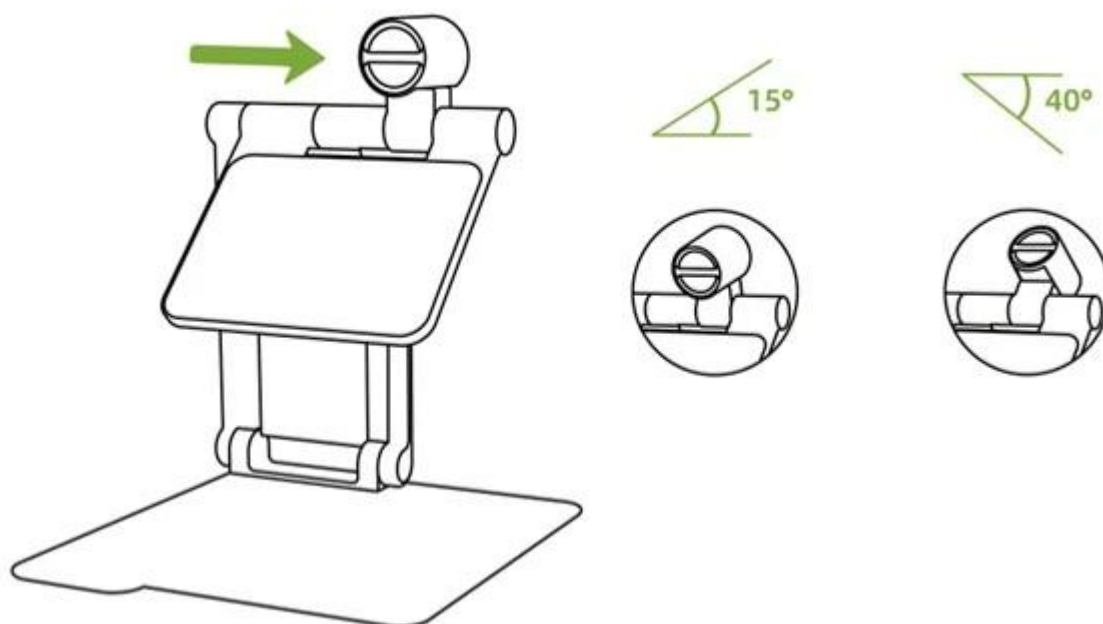

3.5 Carregue a bateria

- Ligue o cabo de carregamento à entrada de carregamento, conforme mostrado na figura abaixo.
- Cor indicadora: Amarelo ao carregar; verde quando totalmente carregado.

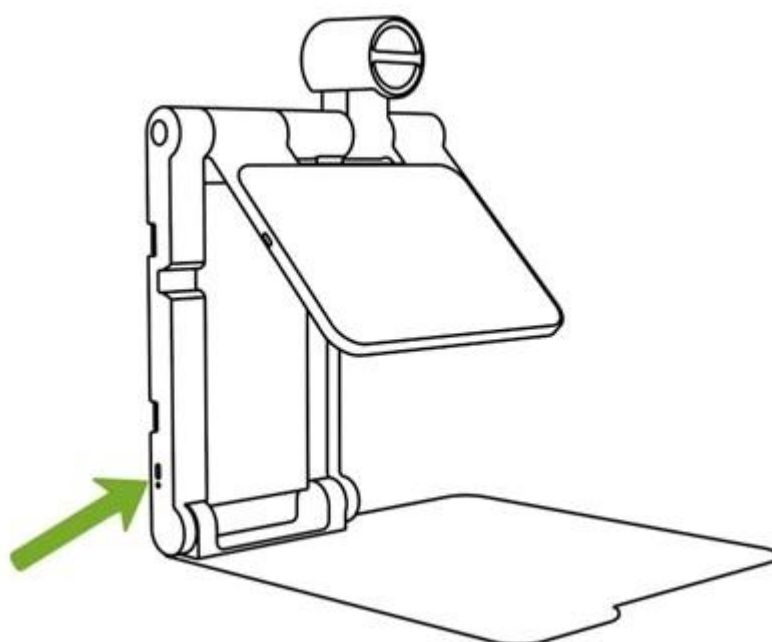

O Snow Pad demora 4,5 horas a estar totalmente carregado e pode ser utilizado continuamente durante 5 horas. Quando a bateria está fraca, o respetivo símbolo aparece no ecrã. Por favor, recarregue a bateria para evitar que o dispositivo desligue inesperadamente.


4. Use com um tablet

4.1 Tablets recomendados


- iPad, iPad Air, iPad Pro, com iPadOS 16 ou superior.**
- Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, com Android 8 ou superior.**

4.2 Posicionar/Remover Tablet

Cole a folha magnética no centro da parte de trás do tablet (ou da capa de proteção do tablet) e espere cerca de 15 minutos antes de o colocar na bandeja.

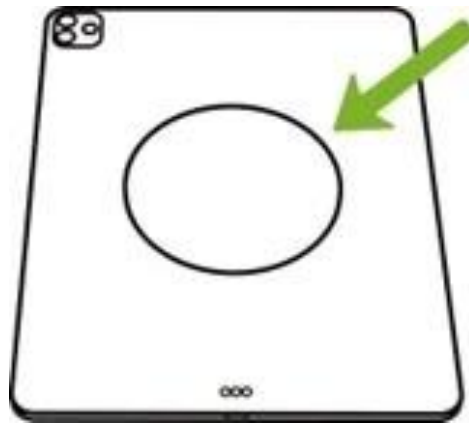

Certifique-se sempre de que a câmara do tablet não fica tapada pela bandeja.

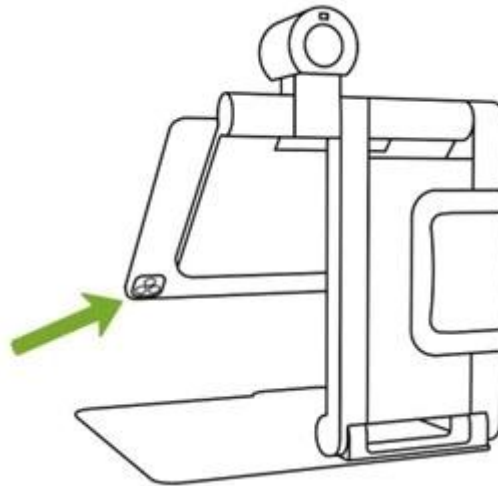

Segure na extremidade inferior do tablet e deslize-o horizontalmente ao longo da bandeja para o remover.





4.3 Ligue o dispositivo ao tablet

- **Coloque o tablet horizontalmente na bandeja com a interface/ligar no lado esquerdo.**
- **Use o cabo de ligar curto fornecido para ligar a porta Type-C no lado esquerdo do suporte à porta de carregamento no tablet. Geralmente é usado um cabo de ligação USB-C para USB-C, mas alguns iPads exigem um cabo de ligação USB-C para Lightning.**
- **Se a ligação não for bem-sucedida, o ecrã exibirá uma mensagem de falha de ligação.**

4.4 Ligar/Desligar

Pressione prolongadamente o botão ligar/desligar por 2s para ligar/desligar o dispositivo. Quando o

dispositivo estiver ligado, a luz do botão estará verde.

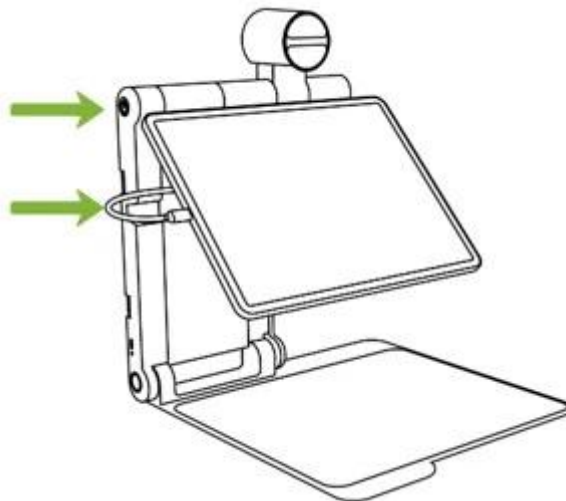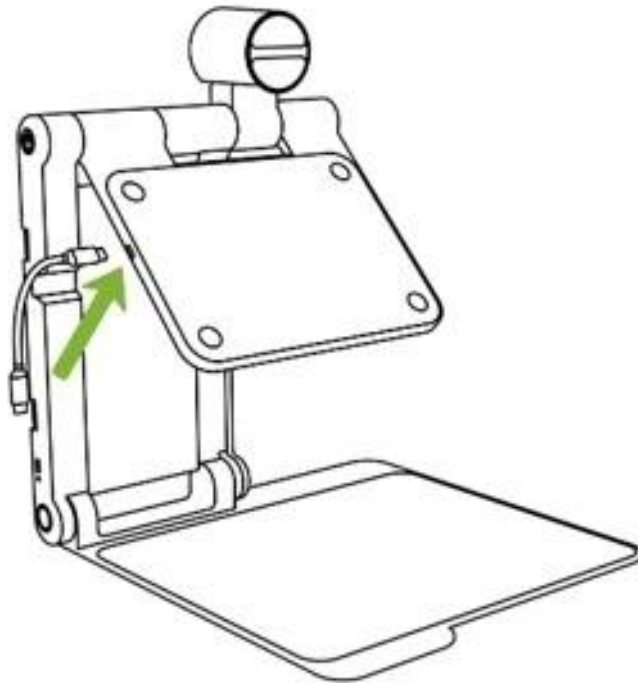

5. Baixe a aplicação SnowPad

- **Para iPadOS, pesquise "Snow Pad" na APP Store ou digitalize o código QR abaixo para baixá-lo.**

- **Para o sistema Android, faça o download do pacote de instalação do site oficial da Zoomax (<https://www.zoomax.com/>) ou digitalize o código QR abaixo para baixá-lo.**

iPadOS:




Androide:



Tenha em atenção que a aplicação funciona apenas quando o seu tablet está ligado ao Snow Pad.

Seguem-se as principais funções da aplicação. Pode encontrar vídeos de demonstração no YouTube: www.youtube.com/@ZooMaxmagnifier.

5.1 Página inicial 1

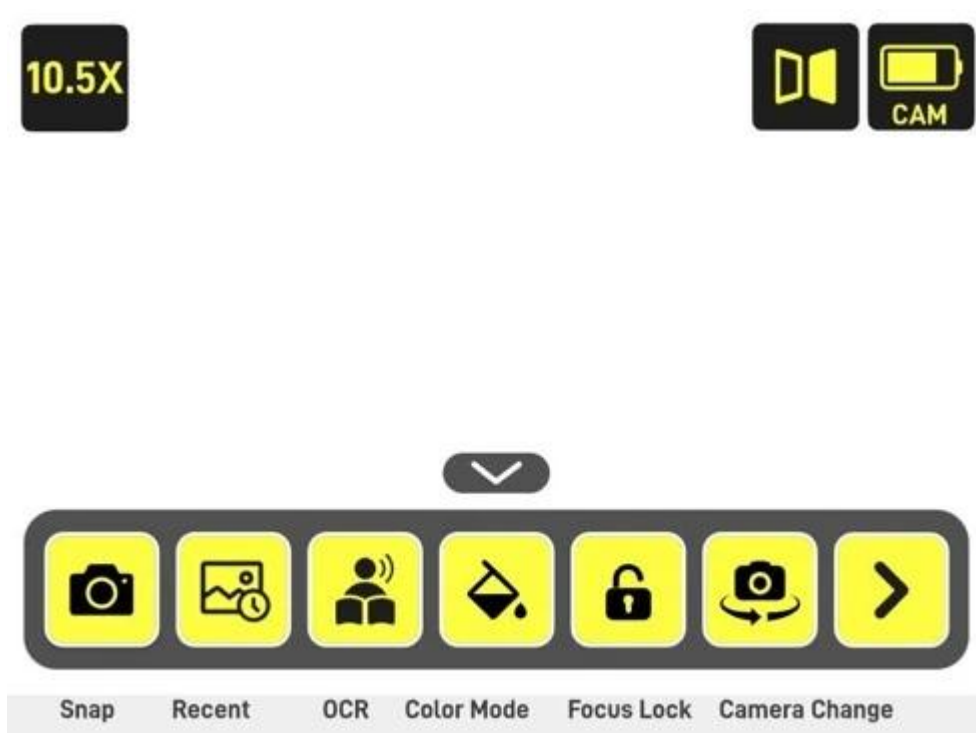



O menu da parte inferior do ecrã oculta-se automaticamente após 5s de inatividade. Toque em qualquer lugar do ecrã para o exibir novamente.

Também pode ocultar e visualizar manualmente ao tocar no ícone .

Intervalo de ampliação



Exibe ampliação em tempo real, de 1 a 32x.

Aumentar ou diminuir o zoom

Junte ou afaste ambos os dedos no ecrã tátil para ajustar a ampliação.

Movimento panorâmico

Nenhum ícone, mas atalho.

- **Movimento panorâmico de imagem: quando o nível de ampliação for superior a 1x, use um ou dois toques com os dedos para mover a imagem.**
- **Movimento panorâmico ao vivo:**
 - **(1) Câmara de visualização à distância: Toque com dois dedos com movimento panorâmico quando o nível de ampliação for superior a 7x;**
 - **(2) Câmara de visualização ao perto: Toque com dois dedos com movimento panorâmico quando o nível de ampliação for superior a 1x.**

Correção de imagem espelhada



Toque no ícone para a correção de imagem espelhada, especialmente quando está a visualizar a sua própria imagem com a câmara de zoom ótico.

Bateria da câmara do Snow Pad



Exibe o nível de carga da bateria do Snow Pad.

Obter imagem



Toque no ícone para obter uma imagem. Será guardada automaticamente.

Congelar

Mantenha pressionado o botão de obter imagem por 1 segundo para congelar o ecrã. Pressione novamente para descongelar.

Recentes



Toque no ícone para ver a imagem ou ficheiro guardado mais recente.

OCR/conversão de texto em fala



Toque no ícone para começar. Por favor, coloque o material de leitura o mais plano possível, melhorará a taxa de reconhecimento e a precisão.

Modo de cor




Toque no ícone para alterar o modo de cor, e mantenha este ícone pressionado por 1s para voltar para a cor verdadeira diretamente. Possui 10 tipos de cores de alto contraste que podem ser ativadas ou desativadas nas Configurações.

Ajuste do valor de contraste


Nenhum ícone, mas atalho.

No modo de cores de alto contraste, deslize um dedo para cima e para baixo na borda direita do ecrã para ajustar o valor de contraste até ver a imagem de forma clara.

Localizar

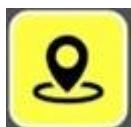

Utilize a função Localizar para localizar facilmente a área de zoom. Ela só funciona quando o nível de ampliação é superior a 1x. Toque no botão Localizar no ecrã para entrar. É apresentada uma moldura vermelha. Toque novamente, o ecrã volta ao nível de ampliação anterior e a caixa vermelha desaparece.

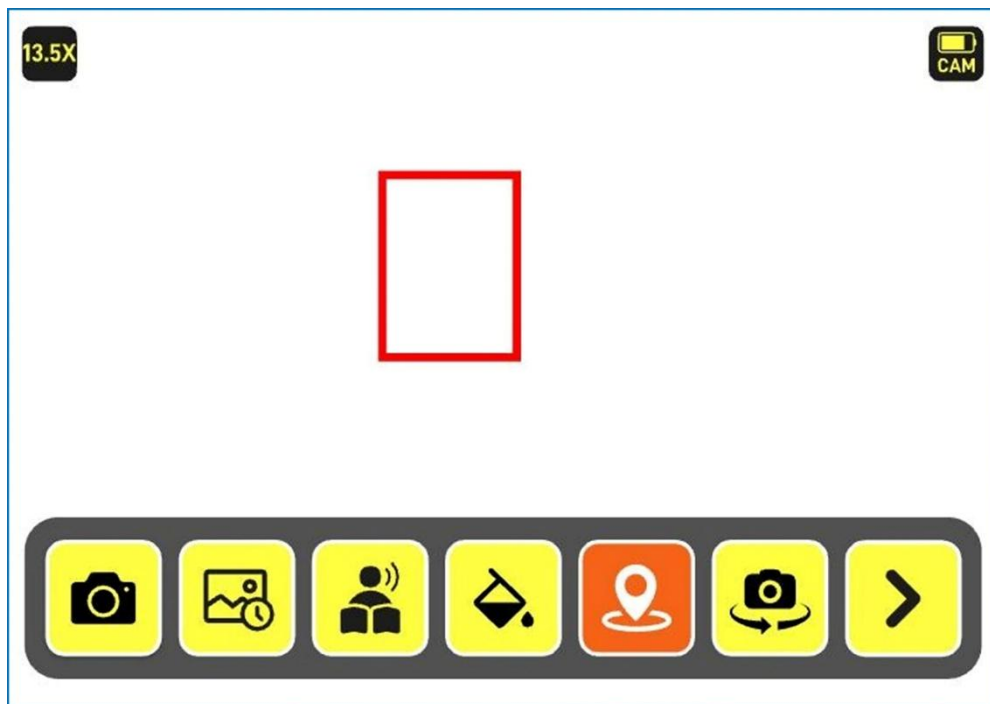

Mudança de modo de câmara




Toque no ícone para alterar.

A sequência de mudança de ecrã é: ecrã completo de visualização à distância → ecrã completo de visualização ao perto → ecrã dividido à esquerda e à direita → ecrã dividido para cima e para baixo.

Ao dividir o ecrã, clique no ícone de alteração no centro para alternar a posição dos dois ecrãs.


Atalho: Toque suavemente com dois dedos no centro da borda esquerda do ecrã também permite a mudança do modo de câmara.

Ecrã inteiro de visualização ao perto

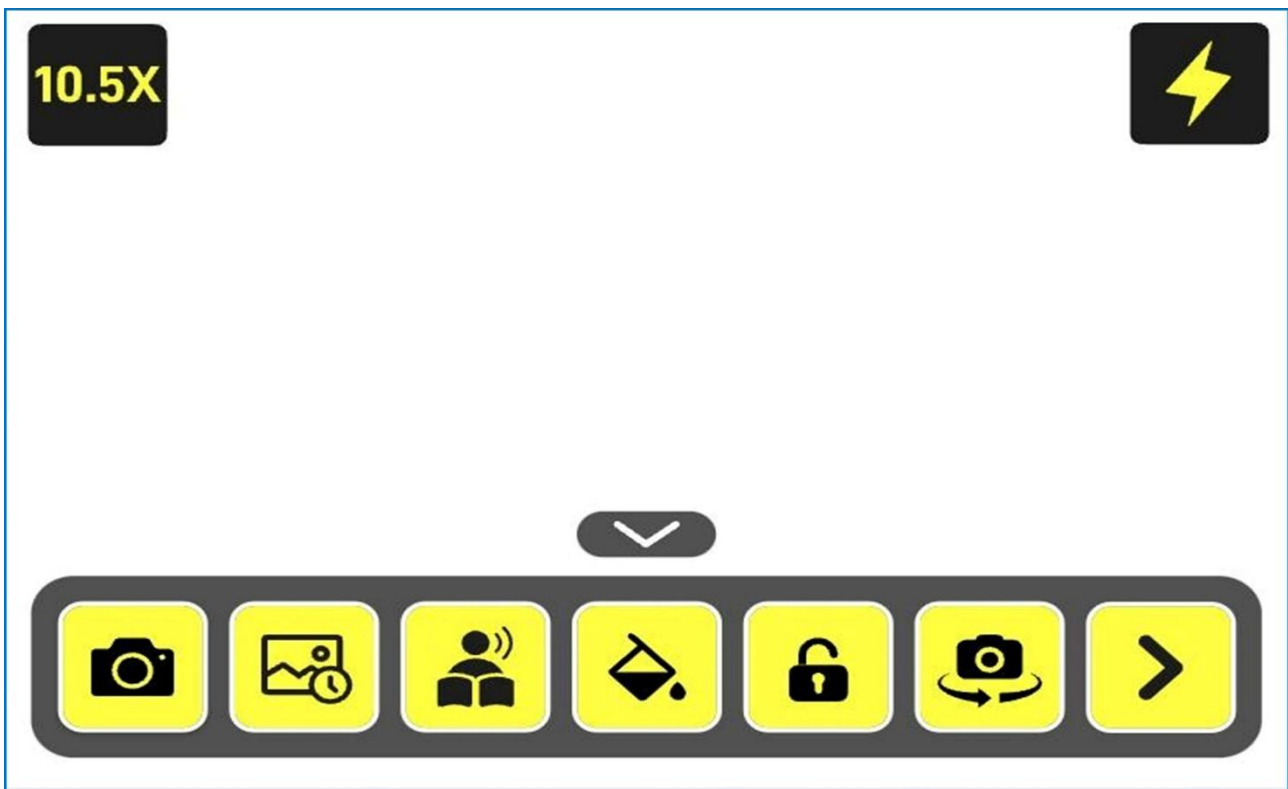


Para alguns tablets que possuem flash, pode tocar neste ícone para o ligar quando utiliza a visualização ao perto.

Ecrã dividido: para cima e para baixo

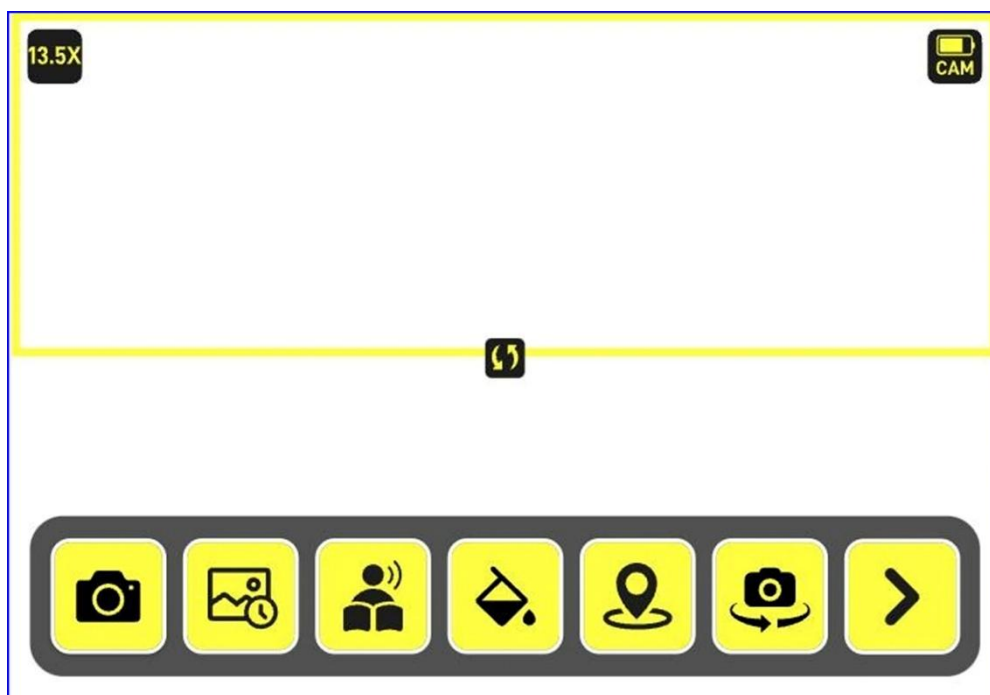

Ecrã dividido: esquerda e direita

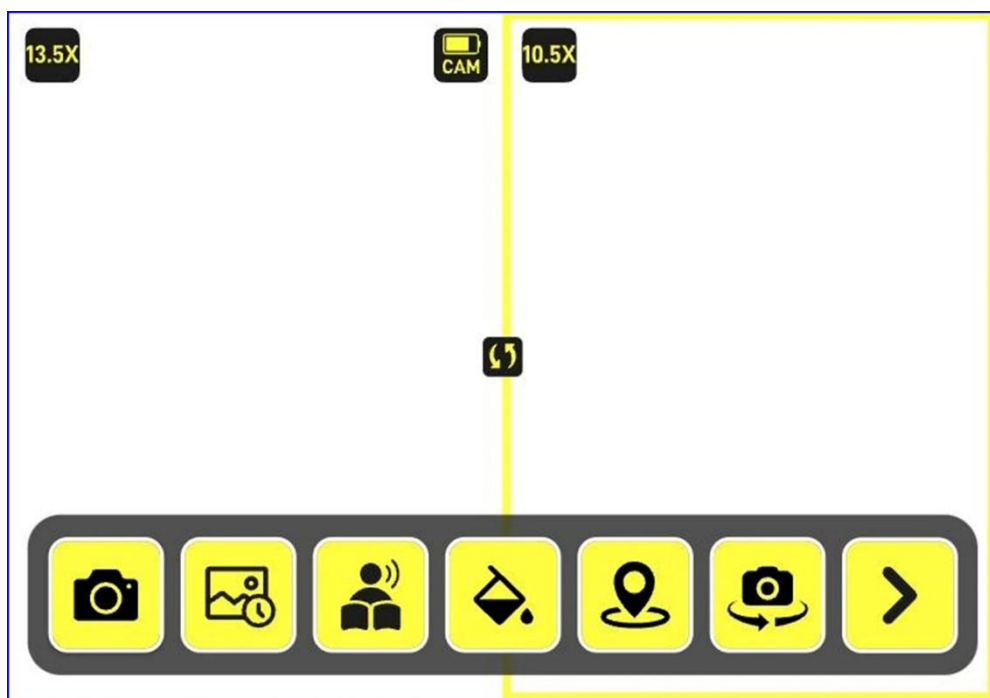


Coloque o dedo neste ícone e arraste-o para cima/baixo ou para a direita/esquerda para ajustar o tamanho dos ecrãs.

Saiba mais



Toque no ícone para expandir mais ícones de função e vá para a página inicial 2.

5.2 Página inicial 2

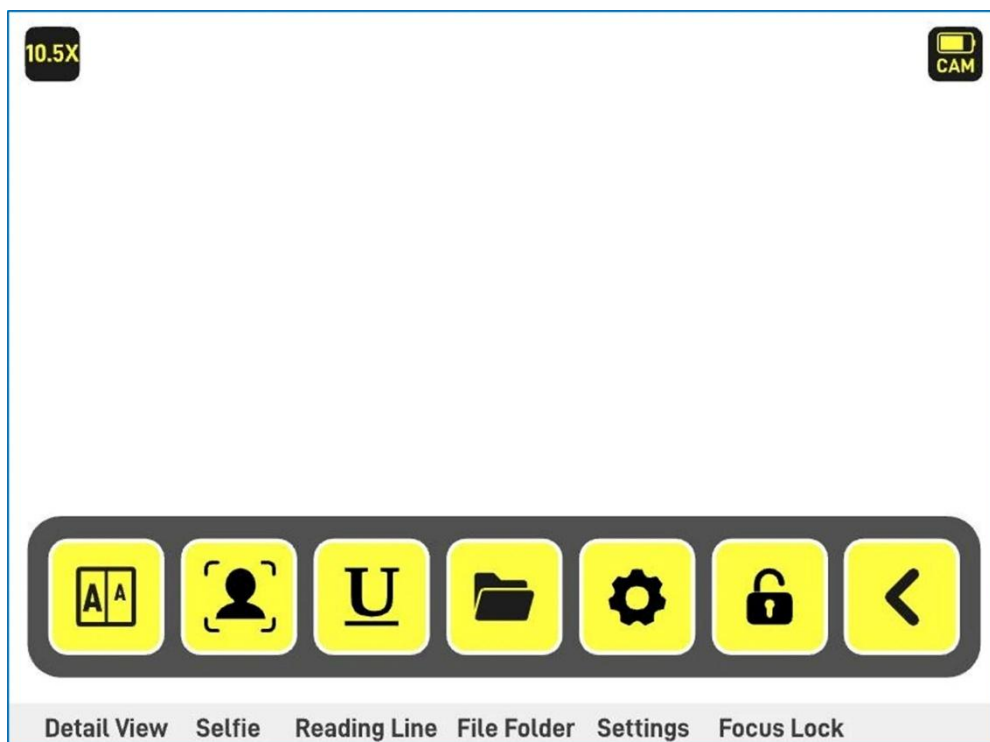


Visualização de detalhes




Toque no ícone, o ecrã é dividido na parte esquerda e direita, a ampliação no lado esquerdo é aproximadamente 4 vezes maior do que o lado direito. Há uma moldura vermelha no lado direito.

Coloque o material de leitura sob a câmara, arraste o quadro vermelho com o dedo para onde deseja ver e, em seguida, verifica que ele foi ampliado no lado esquerdo.

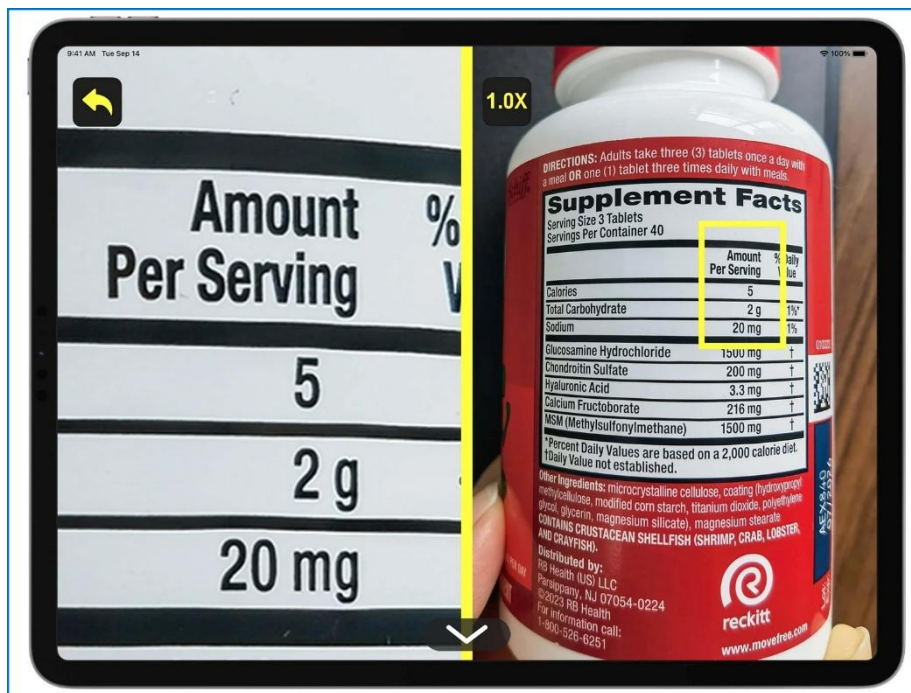

Selfie

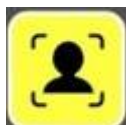


Toque no ícone, o ecrã muda para a câmara frontal do tablet, para que possa tirar uma selfie ou aplicar maquilhagem.

Linha de leitura



Toque no ícone para escolher entre os 5 tipos de linha de leitura ou máscara que preferir. A a linha de leitura/máscara pode ser movida no ecrã. Além disso, pode escolher 6 tipos de cor de linha de leitura nas Configurações.

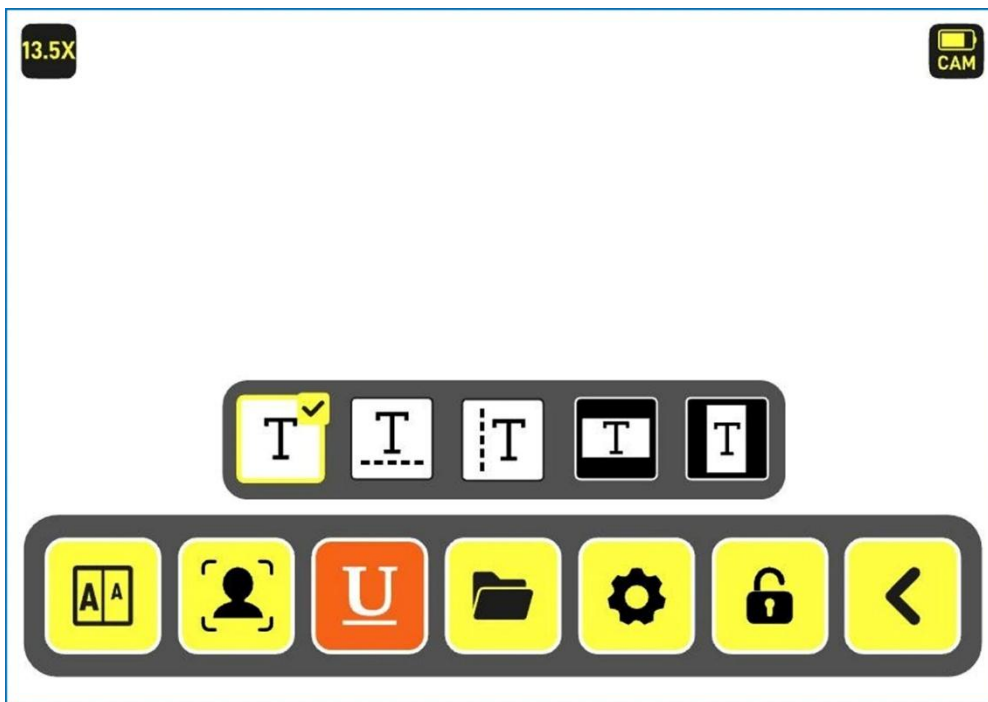

Pasta de Ficheiros



Toque no ícone para abrir a pasta (ver 5.5) .

Configurações



Toque no ícone para entrar na página de configurações (ver 5.6) .

Bloqueio de foco



Toque no ícone para bloquear ou desbloquear o foco das câmaras. Ao ser bloqueada, a imagem não focará de forma repetida à mesma distância, o


que é ideal para escrever ou olhar ao longe na sala de aula.

Voltar



Toque no ícone para recolher os ícones de expansão e volte para a página inicial 1.

5.3 Revisão de imagem e OCR/Texto-para-fala

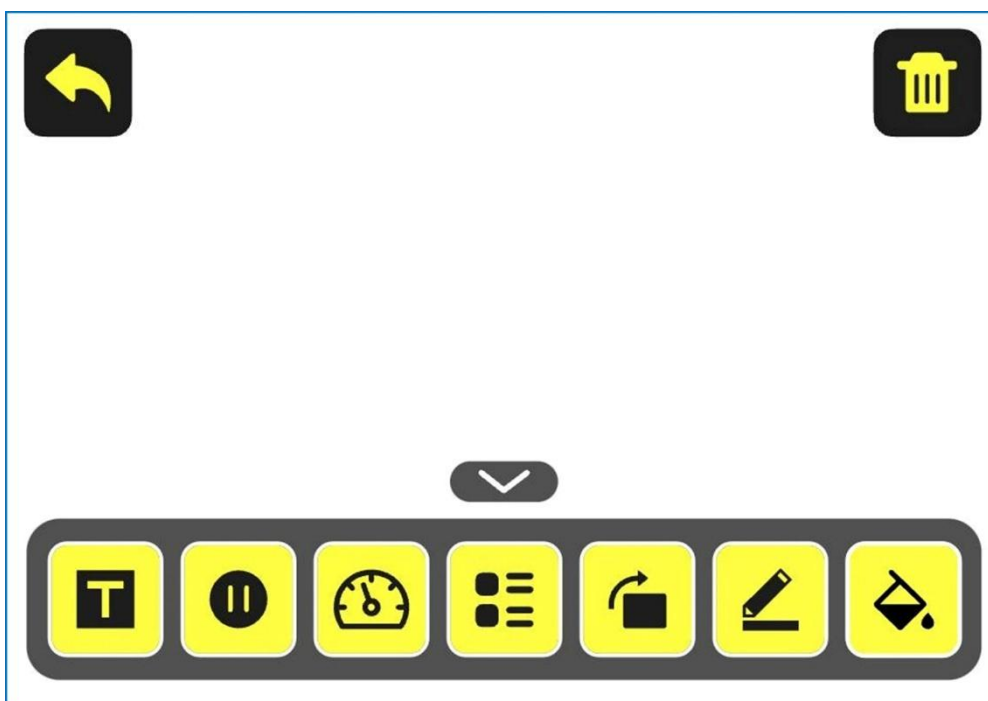

Imagem/Texto



Toque no ícone para alternar entre o modo de imagem e modo de texto.

Ler




Toque no ícone para iniciar a conversão de texto em fala.

Velocidade



Toque no ícone para escolher a velocidade de leitura.

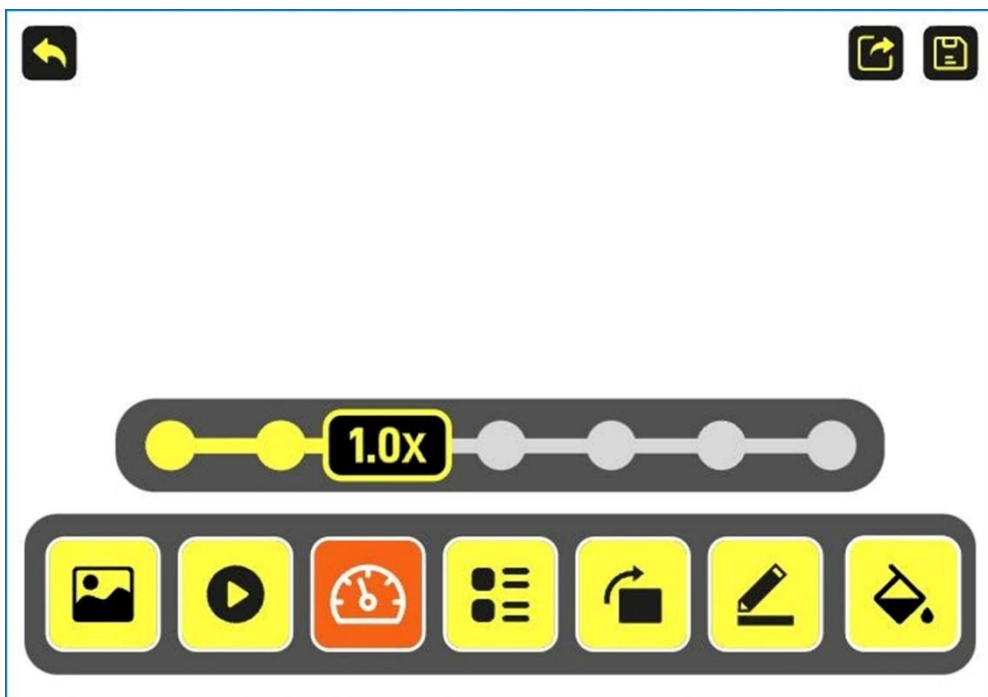

Reconhecimento de texto



No modo de imagem, clique no ícone para alterar o modo de reconhecimento de texto para

tornar a área de leitura mais clara. Há um total de 3 modos diferentes:

1.Sem modo de reconhecimento 

2.Reconhecimento por parágrafo 

3.Reconhecimento por linha 

Mudança de Direção



Toque no ícone para girar a imagem 90 graus no sentido horário.

Editar



Toque no ícone para entrar no modo de edição da imagem (ver 5.4)

Modo de cor



Toque no ícone para alterar o modo de cor.

5.4 Edição de imagem



Saída



Toque no ícone para sair da página de edição e voltar à página de visualização da imagem.

Gravar



Toque no ícone para gravar a imagem na pasta do arquivo.

Anular



Toque no ícone para anular a operação e voltar para a última etapa.

Mudança de Direção




Toque no ícone para girar a imagem 90 graus no sentido horário.

Pincel



Toque no ícone para alterar as cores do pincel.

Pressione longamente o ícone para abrir todas as opções: quatro cores e três pincéis.

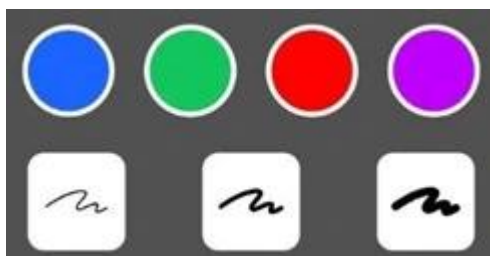

Modo de cor



Toque no ícone para alterar o modo de cor.

Corte




Toque no ícone para entrar no modo de corte, a caixa de corte pode ser movida.

Desfocado




Toque no ícone e, em seguida, com um dedo pode desfocar a área de uma imagem.


5.5 Pasta de arquivo

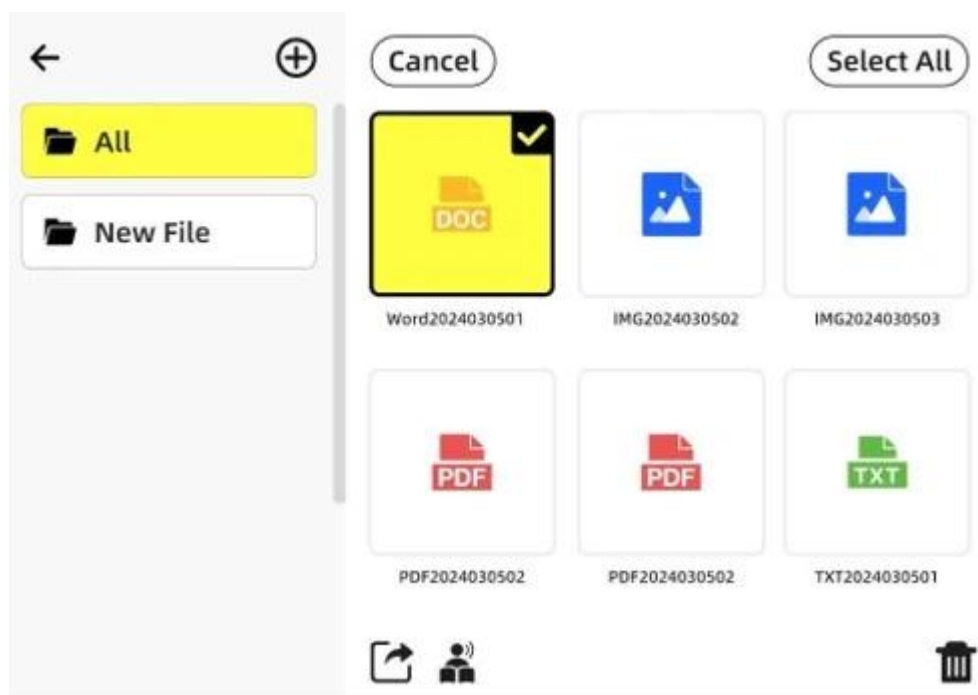

A aplicação vem com uma pasta inicial que contém todas as imagens e documentos, organizados em ordem cronológica de gravação, com o mais recente exibido no topo.

Pode criar novas pastas clicando no sinal mais , nomeando-as como quiser.



Selecione algumas imagens ou selecione todas, exclua-as ou compartilhe-as, ou mova-as de uma pasta para outra.

Depois de selecionar uma ou mais imagens, clique no ícone OCR  no canto inferior esquerdo para obter o conteúdo em modo de texto ou em Texto-Para-Fala.

5.6 Configurações


Modo Básico

Quando ativa o modo básico, a página principal mantém o máximo de 6 ícones de função. Isto facilita a sua utilização e reduz o esforço de aprendizagem. Exceto para as configurações que são fixadas na página principal, os outros podem ser escolhidos por si. E também pode definir a ordem em que esses ícones são posicionados.

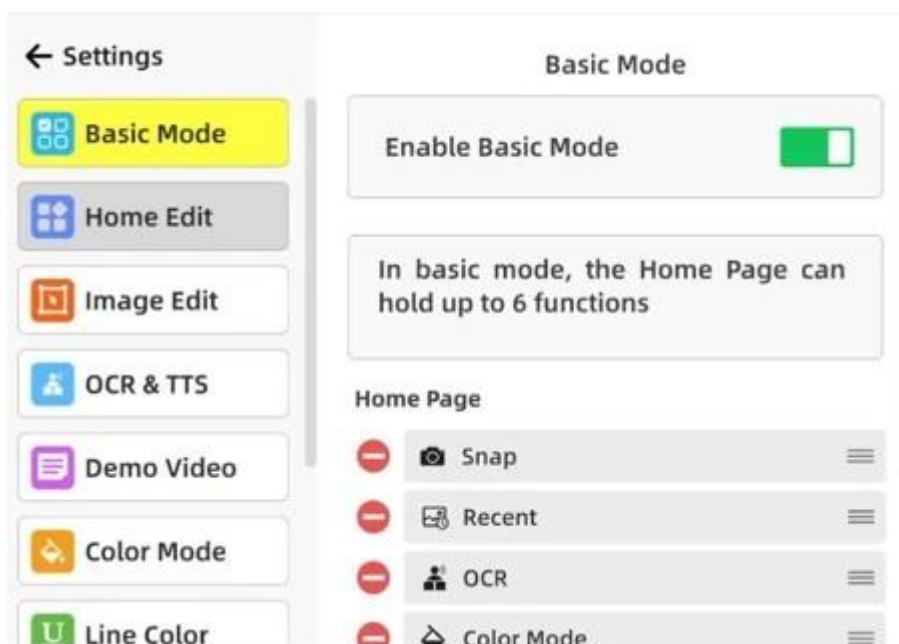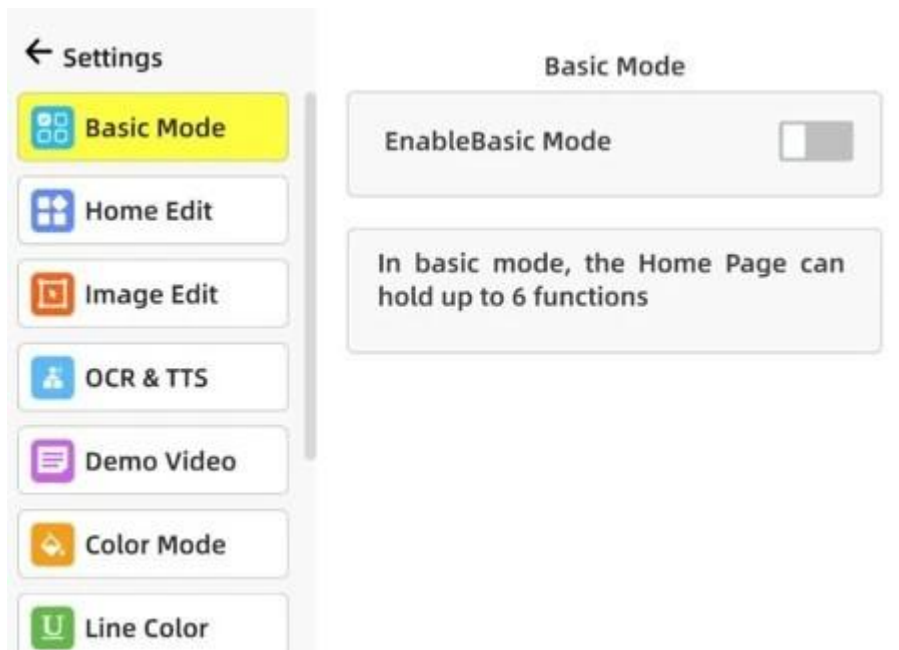


Configuração da página inicial

Pressione prolongadamente o ícone direito e arraste-o para cima e para baixo para mover a posição do item e, em seguida, a sua posição na página inicial será alterada de acordo.

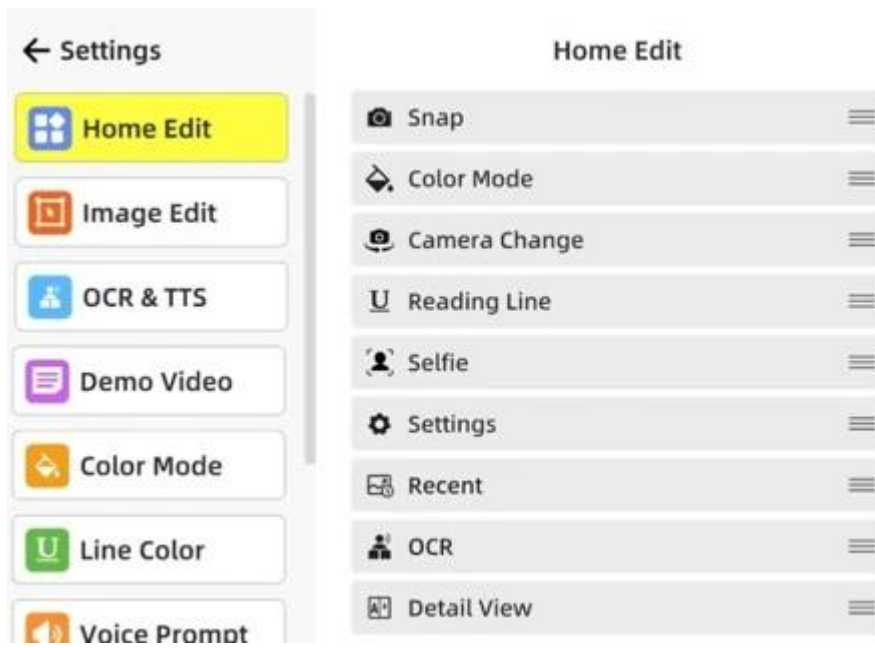


Edição de imagem

Pressione longamente o ícone direito e arraste-o para cima e para baixo para mover a posição do item e, em seguida, a sua posição na página de visualização da imagem será alterada de acordo.

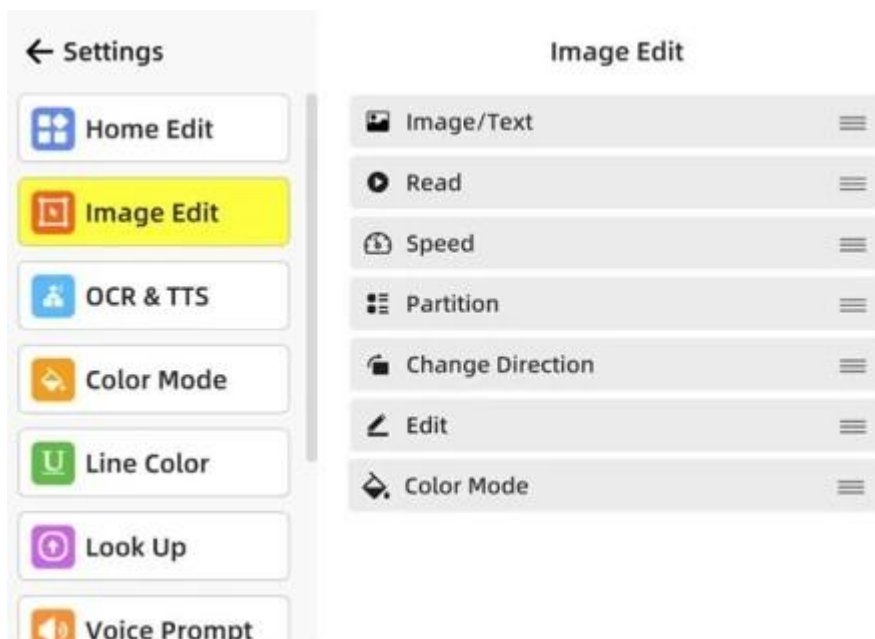

OCR e TTS

Escolha o idioma, defina o volume e a velocidade de leitura.

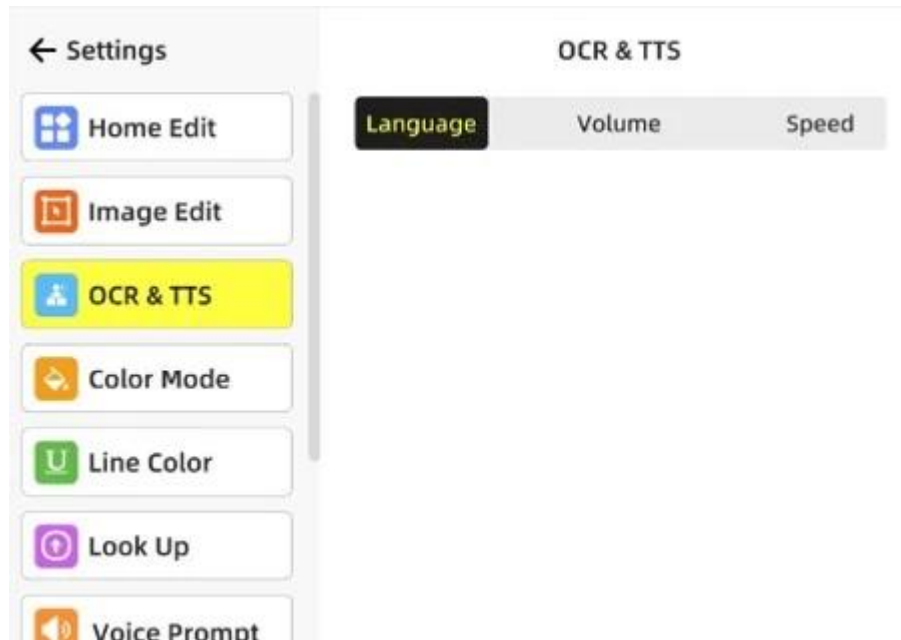


Vídeo de demonstração

Reproduza o vídeo para ver uma demonstração das funções.


Modo de cor

Escolha ativar ou desativar algum modo de cor.

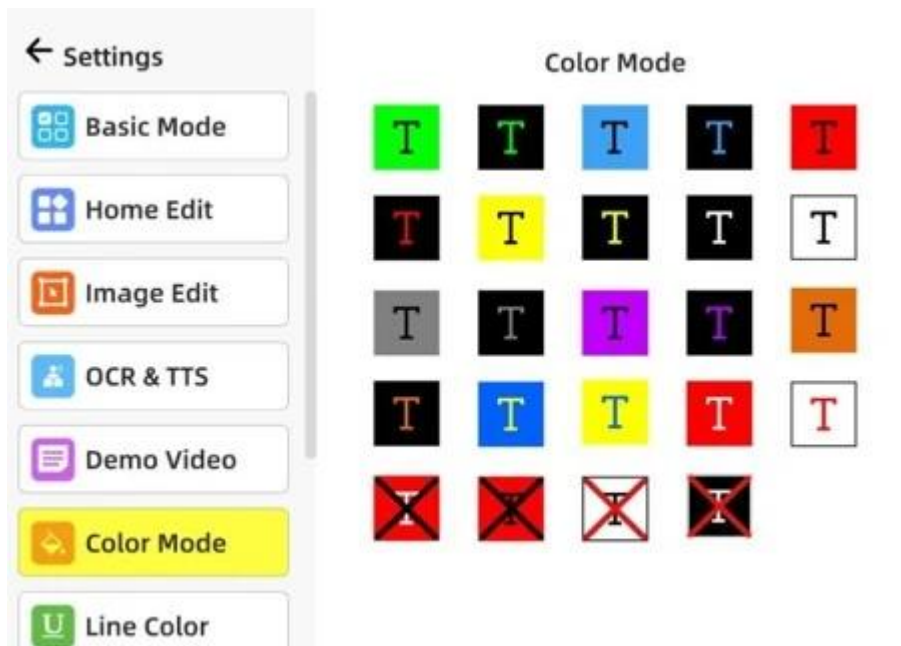

Cor da linha

Escolha uma cor para ler com linha de leitura.

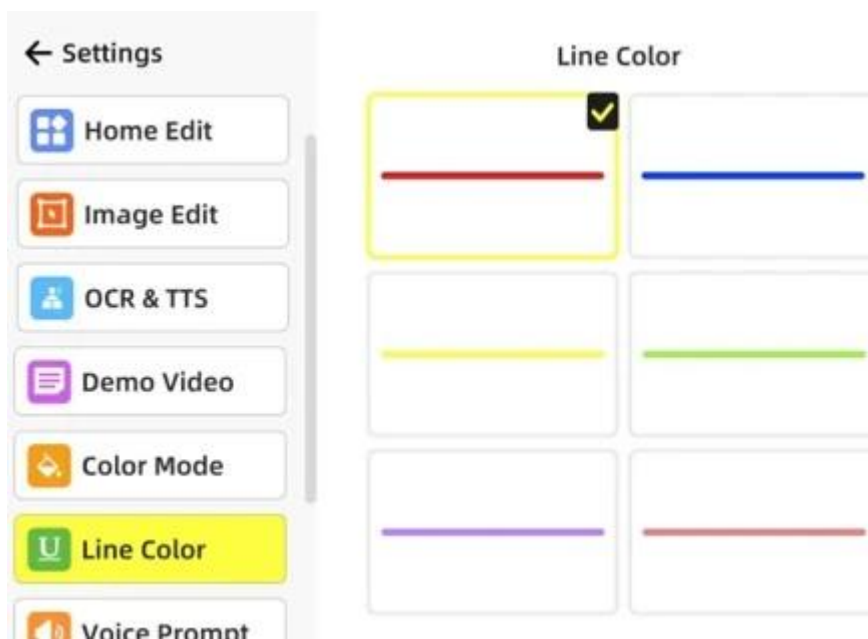


Funções faladas

Com esta função ativada, as funções são faladas sempre que toca num ícone. Pode desativar se não precisar.

Frequência

Suporte para selecionar a frequência local apropriada.

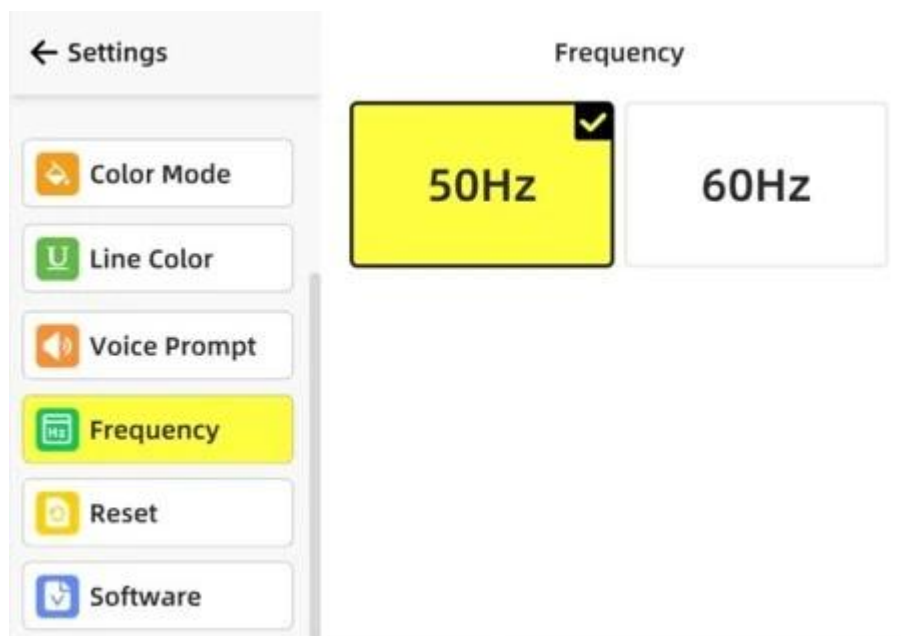


Redefinir

Redefina todas as configurações para o valor de fábrica padrão.


Software

Exiba a versão atual do software.

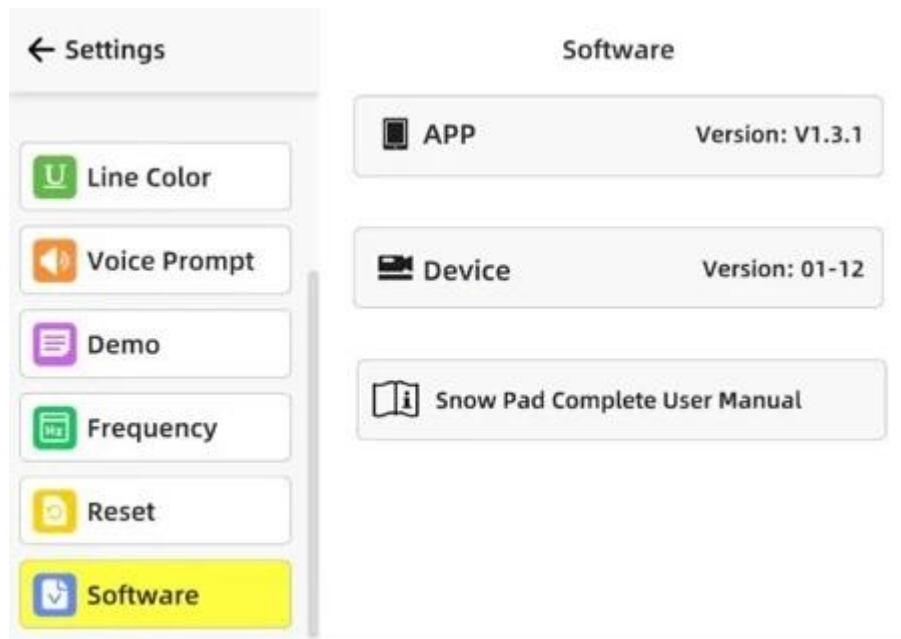

Correção de distorção


Este recurso é ativado por padrão dentro da aplicação. Geralmente é usado sob a câmara do tablet de visualização ao perto, como visualizar um livro ou revista numa mesa, para reduzir o impacto da distorção trapezoidal na leitura.

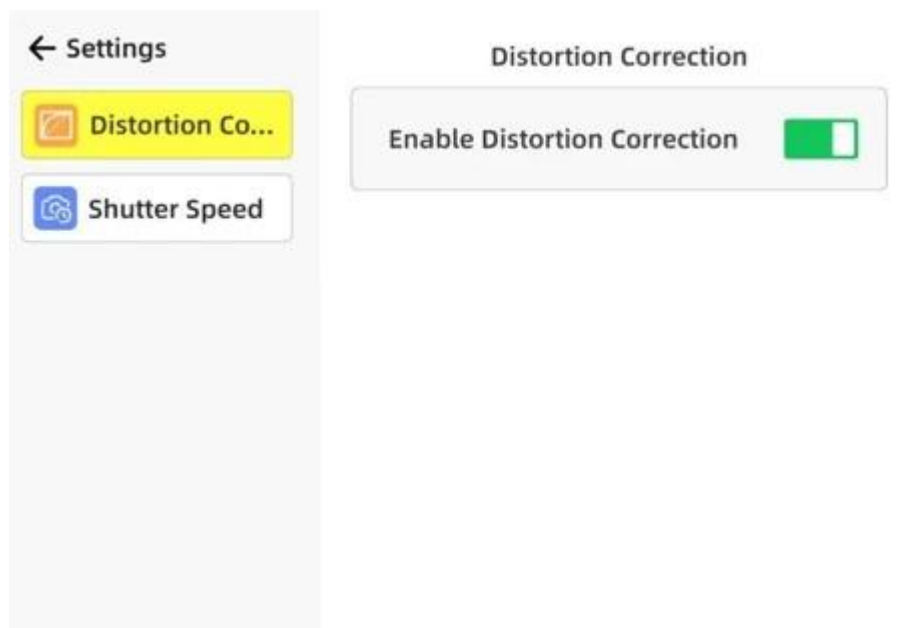

Velocidade do obturador

Pode ajustar a velocidade do obturador da câmara de zoom ótico, que vem configurado com o valor padrão de fábrica e adequado para a maioria das condições.

Se encontrar anomalias na imagem em circunstâncias especiais, tais como linhas horizontais, pode tentar alterar a velocidade do obturador para a ajustar.

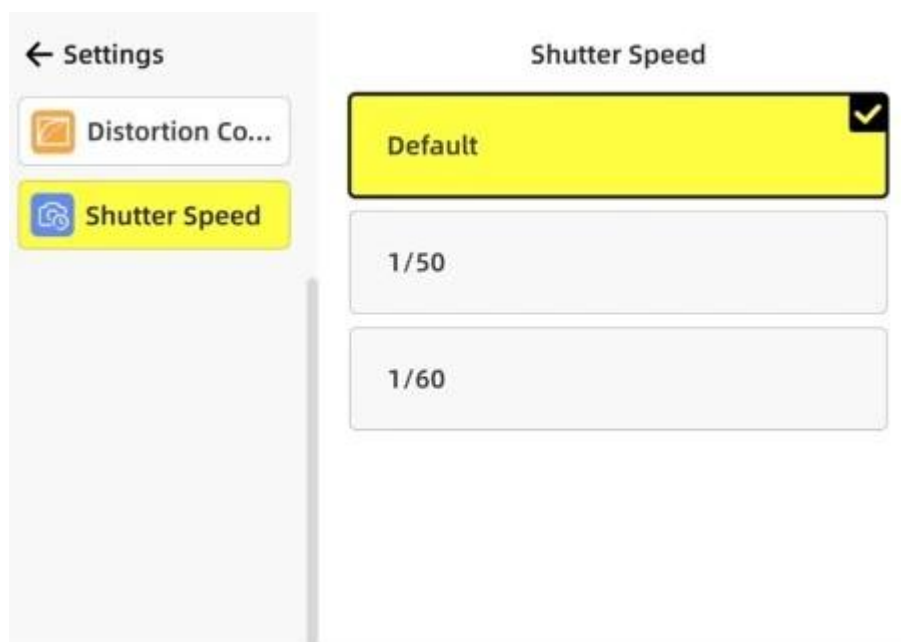

6. Atualização de Software

Dispositivo Snow Pad

Atualização apenas para revendedores.

- **Para iPadOS: V01-08 para V01-09 precisa de cabo USB para ligar a câmara ao PC e, em seguida, copie o pacote de software para atualização da versão de firmware. As versões após 01-09 suportam atualizações OTA dentro da aplicação.**
- **Para Android: V01-06 para V01-12 precisa de cabo USB para ligar a câmara ao PC e, em seguida, copie o pacote de software para atualização da versão de firmware.**
- **As versões posteriores a 01-012 suportam atualizações OTA dentro da aplicação.**

Aplicação Snow Pad AP

- **Para iPadOS: Atualização online na APP Store.**
- **Para Android: Baixe o pacote no site oficial da ZOOMAX.**

7. Especificações

- **Ampliação: 1-32x**
- **Modo de cor: 10 modos de cor de alto contraste**

- **Tamanho dobrável: 309x312x55mm
(comprimento x largura x altura)**
- **Altura do suporte: 278mm**
- **Câmara: zoom ótico 7x, foco automático, 1920 x 1080, 60FPS**
- **Peso: aprox. 2,4kg**
- **Vida útil da bateria: aprox. 5h**
- **Tempo de carregamento: aprox. 4,5h**
- **Adaptador: entrada 100-240V; saída 5V/3^a**

8. Resolução de problemas

Porque é que o dispositivo não liga depois de muito tempo a pressionar o botão ligar/desligar?

Verifique a carga da bateria, carregue-a durante vários minutos e tente novamente.

A luz indicadora perto da porta de carregamento está a piscar com cor amarela?

Significa que o dispositivo está com bateria fraca e precisa de ser carregado o mais rápido possível.

O dispositivo está ligado ao tablet, mas quando está ligado, é apresentado um aviso de que está desligado na aplicação.

Reinicialize a aplicação; volte a ligar o cabo entre o dispositivo e o tablet; ou reinicialize o dispositivo.

A imagem da câmara de visualização à distância do Snow Pad está desfocada.

Toque no ecrã para acionar o foco manualmente;

Limpe a superfície da câmara com o pano de limpeza.

O texto na aplicação é demasiado pequeno para ser lido com clareza.

O tamanho da letra da aplicação segue o sistema do tablet, pode ser ajustado nas configurações do sistema.

Ecrã preto

Se não utilizar a aplicação por 15 minutos, o dispositivo entra em modo de suspensão para economizar energia. Toque em qualquer lugar na aplicação para acordar.

Como contactar a MegaPontes:

- **Telefone: +351 215 900 900**
(Chamada para a rede fixa nacional)
- **Email: geral@megapontes.pt**
- **Endereço: Rua Castilho, 50,**
Edifício Castilho 50 Lj 25, 1250-
071 Lisboa Portugal

Termos e condições de venda

Este produto tem garantia para falhas de fabrico de acordo com os prazos dispostos na Lei Portuguesa, a partir da data de compra. Se tiver algum problema com o produto e não tiver comprado diretamente à MegaPontes, contacte o seu retalhista em primeiro lugar.



Este produto é marcado com marca CE e está totalmente em conformidade com a legislação da UE aplicável.



Por favor, não deposite os produtos marcados com este símbolo no caixote do lixo. Recicle os aparelhos elétricos e eletrónicos gratuitamente no centro de reciclagem local. Procure o centro de reciclagem mais próximo no site <https://ondereciclar.pt/>.

Porquê reciclar?

Os equipamentos indesejados são o tipo de resíduos que mais cresce no mundo moderno.

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, poupando recursos naturais e o ambiente. Se não reciclar, os equipamentos elétricos acabarão em aterros onde as substâncias perigosas se espalham e causam a contaminação do solo e da água – prejudicando a vida selvagem e a saúde humana.

Para lembrá-lo que os equipamentos elétricos antigos podem ser reciclados, estes estão marcados com o símbolo do caixote do lixo cruzado. Por favor, não coloque nenhum equipamento elétrico (incluindo os marcados com este símbolo) no caixote do lixo.

O que é o WEEE?

A diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) , conhecida internacionalmente como WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), exige que os países

maximizem a recolha separada e o processamento ecológico destes produtos.

Data: março 2025.